



Rengöring av flergångsvisir

OBS! Engångsvisir slängs efter användning.

Efter användning:

- Behåll skyddsförklädet på, ta av eventuellt använda handskar
- Desinfektera händerna med alkoholbaserad handdesinfektion
- Ta på rena handskar
- Ta av visiret
- Rengör mekaniskt med mikrofiberduk och vatten om synligt stänk, därefter alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensid om inget synligt stänk är ytdesinfektion tillräcklig.
- Tag av handskena
- Desinfektera händerna med alkoholbaserad handdesinfektion
- Tag av skyddsförklädet (öppna bakifrån, kräng ut -och in, rulla ihop), kasta
- Desinfektera händerna med alkoholbaserad handdesinfektion